



## COLOCAÇÃO DO RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL



1

SUSPENDER O RESPIRADOR DE MANEIRA QUE A PARTE EXTERNA FIQUE APOIADA NA PALMA DA MÃO E OS ELÁSTICOS PERMANEÇAM FOLGADOS EM BAIXO DA MÃO.



2

COLOCAR O RESPIRADOR PRIMEIRO SOBRE O QUEIXO COM O CLIP NASAL PARA CIMA.



3

ELÁSTICO INFERIOR NA REGIÃO DA NUCA (EMBAIXO DAS ORELHAS) E O SUPERIOR ACIMA DAS ORELHAS



4

AJUSTAR/APERTAR O CLIP NASAL NO PERFIL DO NARIZ

5

Verifique a vedação do seu respirador

**INSPIRE PROFUNDAMENTE, SE NOTAR FUGA DE AR, REINICIE O PROCESSO**

**MANTENHA A BARBA SEMPRE APARADA PARA EFICÁCIA DO EPI**

**LEMBRANDO: REALIZE O DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO**